



Nombre

Valva inmovilizadora de tobillo

Ankle immobilizer boot

Código externo

03.01.6110

Código interno

25.6110

Descripción

Brinda inmovilización total al tobillo mediante la estructura rígida que conforma la valva. Indicada para el tratamiento de lesiones y traumatismos de tobillo, esguinces y entorsis o fracturas estables. Cuenta con una funda y dos almohadillas para maléolos en tela bondeada que ayudan a estabilizar y proteger la articulación, además de prevenir la formación de escaras por contacto. Su sistema de cierre con abrojos permiten ajustar el producto según el tratamiento indicado, y desajustarlo para retirarlo fácilmente bajo indicación médica, para realizar una adecuada higiene personal, efectuar curaciones de piel y realizar ejercicios de rehabilitación. Puede utilizarse como alternativa al yeso, y sirve de ayuda para el desplazamiento sin necesidad de muletas. Puede ser utilizado en ambos pies.

Modo de acción

La estructura de la valva limita el movimiento del tobillo, que sumado al calor terapéutico que brinda el textil bondeado, ayudan a una rápida desinflamación de la articulación. Contiene pie, tobillo y pantorrilla, permitiendo mantener a la articulación en una posición neutra, colaborando en la recuperación de las dolencias. Los abrojos permiten regular el ajuste de acuerdo a las necesidades de tratamiento y la anatomía de cada usuario.

Materialidad

Elaborado con goma espuma bondeada con velour de poliamida y no tejido de polipropileno. El velour de poliamida de la cara externa, colabora con la sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior de espuma de poliuretano, otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles golpes.

Tabla de talles / Código de barras

Según número de calzado:

XXS	28 - 30	7798128675257
XS	31 - 33	7798128672454
S	34 - 37	7798128672461
M	38 - 40	7798128672478
L	41 - 45	7798128672485

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Acomodar los protectores de maleolos en el interior de la funda según necesidad.
3. Introducir el pie en el producto, colocando el talón en la esquina de la estructura, entre las almohadillas para maleolos y sosteniendo la funda para que no se desplace.
4. Cerrar la funda abrochando los abrojos.
5. Ajustar las tiras de la estructura según necesidad y abrochar.
6. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Quitar la funda de la valva y lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Funda: Poliamida 40%, Algodón 40%, Espuma de Poliéster 20%
Estructura: Polietileno de alta densidad
Plantilla: Goma EVA (etil vinil acetato).
Suela: Caucho sintético SBR

ficha_de_producto_6110_v.1

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- * Esguinces del tobillo y pie
- * Lesiones ligamentosas del tobillo
- * Entorsis* Fracturas estables
- * Tendinitis
- * Luxaciones
- * Fracturas maleolares
- * Fracturas del calcáneo, talus y cuboides
- * Fracturas del tobillo y tercio distal de tibia
- * Fracturas de los metatarsos y del tarso

Productos relacionados

6100 - 6300 - 6400 - 6500