



Nombre

Venda Deportiva Sport Bandage

Código externo

04.04.VD

Código interno

70.VD

Descripción

La aplicación del vendaje brinda protección y ayuda en la prevención y tratamiento de lesiones. Contiene la zona afectada y limita el movimiento, evitando las secuelas que producen las inmovilizaciones totales y prolongadas. Brinda estabilidad y compresión en la articulación, promoviendo la rehabilitación y prevención durante la práctica deportiva.

Modo de acción

El vendaje ofrece soporte activo para el tratamiento y la prevención de torceduras y lesiones en general. Proporciona apoyo hemodinámico y ofrece comodidad al usuario que puede continuar su entrenamiento. Es importante conocer la técnica apropiada de aplicación, que dependerá de la zona afectada y el tipo de dolencia. La elasticidad posibilita regular su nivel de ajuste, aplicando la compresión deseada.

Materialidad

Elaborada a partir de tejido de algodón, recomendado para situaciones en las que el producto está en contacto directo con la piel. El tipo de tejido da como resultado una venda de elasticidad media y estire longitudinal. Libre de látex.

Tabla de talles / Código de barras

VD10X6	6u. 10 cm x 3 mts. Crudo	7798128672096
VD7X6	6u. 7 cm x 3 mts. Crudo	7798128672102
VD5X6	6u. 5 cm x 3 mts. Crudo	7798128672119
VDNax1	1u. 8 cm x 2,5 mts. Naranja	7798128675363
VDNex1	1u. 8 cm x 2,5 mts. Negro	7798128675356

Instrucciones de uso

- Desenrollar de a poco e ir colocando la venda envolviendo la zona a tratar en forma de espiral, encimando la mitad de la venda sobre la colocada anteriormente. Aplicar la tensión necesaria para obtener la compresión deseada.
- Verificar que no se formen arrugas en la venda y acomodar hasta lograr un grado óptimo de confort.
- Al finalizar, sujetar el vendaje con la misma venda o colocar en el extremo los ganchos sujetadores.

Modo de lavado y Almacenamiento

Para lavar las vendas en lavarropas, se recomienda usar una bolsa de lavados. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Poliamida 53%
Algodón 47%

Advertencias y Recomendaciones

Para una adecuada colocación del vendaje, se sugiere consultar previamente a un especialista. En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. La excesiva tensión de ajuste del vendaje puede impedir la correcta circulación sanguínea. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica. Quite el vendaje si siente entumecimiento, hormigueo o la extremidad fría o pálida, frote suavemente el área y vuelva a realizar un vendaje cuando se recupere.

Patologías

- * Esguinces de primer y segundo grado
- * Tendinitis
- * Tenosinovitis
- * Distensiones musculares
- * Rotura fibrilar parcial
- * Fisuras y epifiolisis no desplazadas
- * Linfedemas
- * Insuficiencias venosas crónicas
- * Flebotrombosis
- * Tromboflebitis
- * Entorsis
- * Lesiones articulares
- * Profilaxis

Productos relacionados

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Crudo/Negro/Naranja
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	75 g / 0,075 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-14 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global