



Nombre

Tobillera de compresión para fascitis plantar

Plantar fascitis compression ankle support

Código externo

1301-TF

Código interno

P451PTF

Descripción

Proporciona alivio del dolor para la fascitis plantar, el dolor en el talón y en el arco al estirar continuamente la fascia plantar para evitar más daños y prevenir la recurrencia de la fascitis plantar. Cuenta con compresión gradual en la parte inferior de la tobillera, lo que ayuda a aliviar el dolor de la fascitis plantar y comprime el ligamento de la fascia plantar.

Contribuye al alivio de las molestias en la zona plantar del pie, ocasionadas por la práctica deportiva, mediante la aplicación de compresión y calor terapéutico, que mejoran la circulación sanguínea.

Mejora la oxigenación, ayudando a acelerar la recuperación muscular en el pie.

El diseño tubular ofrece una contención uniforme a lo largo de todo el producto.

El ajuste moderado y peso ligero conforman un producto ideal para utilizar durante la práctica deportiva.

Modo de acción

Proporciona alivio al talón y arco gracias a su soporte de compresión, proporcionando el máximo impulso a la circulación sanguínea. Una mejor circulación de oxígeno ayuda a reducir la acumulación de ácido láctico y ayuda a la recuperación muscular en el tobillo y los pies, incluidos el talón y el arco.

Materialidad

Elaborado con materiales de alta resistencia y elasticidad, el tejido liviano y transpirable está especialmente pensado para estar de pie durante largos períodos de tiempo. El tejido antiolor y antiestático detiene el crecimiento de bacterias y hongos, absorbiendo la humedad de los pies. La poliamida, posee un excelente cuadro de propiedades mecánicas, tenacidad elevada y características de deslizamiento y resistencia al desgaste superiores. Este material también se destaca por su alto grado de absorción y evaporación de la humedad.

Tabla de talles / Código de barras

Según el número de calzado:

S	36 - 40 cm	7798128676339
L	41 - 46 cm	7798128676346

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un talle diferente al indicado en la tabla.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 par
Color	Negro
NCM	6115.10.93.000X
Peso sin envase	0.0393 kg
Peso con envase	0.0491 kg
Volumen con envase	0.000609 m3
Industria/Origen	China

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Instrucciones de uso

1. Introducir el pie en la tobillera. El logo PROFIT debe quedar en la parte superior, hacia el frente.
2. Deslizar hacia arriba, haciendo que el área lisa coincida con el talón.
3. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado el abrojo. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

86 % poliamida 14% elastano

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- Fascitis plantar
- Dolor de talón
- Tendinitis
- Espolón calcáneo
- Tendinitis de aquiles

Productos relacionados

TAS - TAS2N - ET1