



Nombre

Inmovilizador de tobillo

Ankle stirrup brace

Código externo

03.02.1300/1302/1304

Código interno

25.1300/1302/1304

Descripción

Brinda inmovilización total de la rodilla, cuenta con dos ballenas anatómicas en la parte posterior y dos laterales de aluminio que contienen la articulación e impiden desplazamientos laterales, de extensión o flexión. Indicado para el tratamiento de lesiones y traumatismos. Cuenta con tres paneles y tiras regulables con sistema de cierre con abrojos que permiten ajustar el producto adaptándose a la anatomía de cada usuario. Fabricado en tela bondeada que optimiza el confort y otorga calor terapéutico, ayudando a la desinflamación de la articulación. Puede ser utilizado en ambas rodillas.

Modo de acción

Las ballenas limitan el movimiento de la rodilla, que sumado al calor terapéutico que brinda el textil bondeado, ayudan a una rápida desinflamación de la articulación. Ajustando firmemente el muslo y los gemelos, mantiene la rodilla en posición neutra, colaborando en la recuperación de las dolencias. Los abrojos permiten regular el ajuste del inmovilizador de acuerdo a las necesidades del tratamiento y la anatomía de cada usuario.

Materialidad

Elaborado a partir de un textil bondeado, compuesto por goma espuma, jersey de algodón y velour de poliamida. El laminado interno de jersey de algodón es hipoalérgico, resultando amigable al contacto con la piel, mientras que el velour de poliamida de la cara externa cumple la función de sujeción del abrojo y es agradable al tacto. El interior del material está compuesto por goma espuma de poliuretano de 8 milímetros de espesor, la cual otorga un acolchado cómodo y protege la articulación de posibles golpes. El resultado de esta combinación de materiales es una tela confortable, agradable al tacto y con una excelente eficiencia terapéutica.

Tabla de tallas / Código de barras

Según largo de pierna:
desde 2da cadera a mitad de pantorrilla.

Talla	Largo (cm)	Código de barras
1300	50 cm	7798128673567
1302	57 cm	7798128673574
1304	64 cm	7798128673581

Esta tabla representa medidas promedio. Las preferencias o figuras individuales pueden requerir el uso de un tamaño diferente al indicado en la tabla.

Instrucciones de uso

1. Desabrochar los abrojos.
2. Colocar el inmovilizador rodeando la rodilla, con la abertura hacia adelante y la parte más ancha del producto hacia arriba. La rótula debe quedar en la parte media del producto.
3. Posicionar los paneles laterales regulando la compresión según necesidad.
4. Ajustar los abrojos y acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	9021.10.10
Peso sin envase	635 g / 0,635 Kg
Peso con envase	
Volumen con envase	
Industria/Origen	Argentina

Producto fabricado por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-12 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

Director Técnico:
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

Dirección:
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

Atención al Consumidor:
www.ptm.global - info@ptm.global

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar a mano, con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrados los abrojos y extraer las ballenas. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.



Composición

Espuma de Poliuretano 49.5%, Algodón 34%, Poliamida 16.5%

Patologías

- * Traumatismos de rodilla
- * Lesiones de rodilla
- * Lesiones de ligamento cruzado anterior
- * Lesiones de ligamento cruzado posterior
- * Lesiones de ligamento cruzado lateral
- * Patologías de MCL - Ligamento Colateral Medio
- * Patologías de LCL - Ligamento Colateral Lateral
- * Patologías de ACL - Ligamento Cruciforme Anterior
- * Patologías de PCL - Ligamento Cruciforme Posterior
- * Distensiones ligamentarias

Productos relacionados

1200/1202/1204 - R12