

# PROFIT

## ACTIVÁ TUS DÍAS



Nombre

**Porta Gel regulable. Rodilla, Muslo, Lumbar, Hombro.**  
Adjustable compress holder. Knee, Thigh, Lumbar, Shoulder.

Código externo

1601-P1325

Código interno

P201PP1325

Descripción

Gracias a sus cierres regulables, otorga una fácil colocación y ajuste, adaptándose a las diferentes anatomías y necesidades del usuario. Además, cuenta con tiras elásticas que mantienen el gel en posición. El gel brinda frío o calor terapéutico, ayudando a aliviar lesiones, contracturas, desgarros y dolencias. Su materialidad ayuda a conservar la temperatura del gel en la zona afectada.

Incluye una banda elástica desmontable, que permite la utilización en hombro y lumbar.

Modo de acción

El frío, por su capacidad antiinflamatoria, ayuda en casos de lesiones con proceso inflamatorio como desgarros, esguinces, contusiones y tendinitis. El calor se debe aplicar en casos de contracturas, espasmos musculares o rigidez en articulaciones.

Materialidad

El neoprene es un material sintético de alta elasticidad, aislación térmica, resistencia y durabilidad, que otorga compresión y contención, reduciendo el estrés en articulaciones y músculos. El bolsillo está confeccionado con tela respirable, que permite el paso de la temperatura sin acumular humedad.

Tabla de talles / Código de barras

<b>UNIVERSAL</b>	7798128676384
------------------	---------------

Envase	Bolsa
Cantidad	1 unidad
Color	Negro
NCM	6307.90.90
Peso sin envase	86 g
Peso con envase	137 g
Volumen con envase	0.0006 m3
Industria/Origen	Argentina

Instrucciones de uso

#### Para rodilla y muslo:

1. Retirar la banda elástica desmontable.
2. Colocar la compresa de gel en el bolsillo y luego este sobre la zona afectada, con la cara de neoprene del lado externo.
3. Retirar la protección del abrojo y ajustar.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

#### Para hombro y lumbar:

1. Utilizar con la banda elástica adicional.
2. Colocar la compresa de gel en el bolsillo y luego este sobre la zona afectada, con la cara de neoprene del lado externo.
3. Ajustar y cerrar el abrojo.
4. Acomodar el producto hasta llevarlo a su grado óptimo de confort.

Modo de lavado y Almacenamiento

Lavar con agua a temperatura natural y jabón neutro. Durante el lavado se recomienda dejar cerrado los abrojos. No usar lavandina. No exponer al sol o altas temperaturas. Dejar secar a la sombra en lugar aireado. No retorcer. No planchar.

Advertencias y Recomendaciones

En caso de irritación cutánea u otras molestias, suspender su uso y consultar a un médico. No se recomienda usar mientras se duerme ni que el producto entre en contacto directo con piel herida, salvo indicación médica.

Patologías

- \* Traumatismos
- \* Dolores menstruales
- \* Tensiones musculares
- \* Dolores artríticos
- \* Contracturas
- \* Desgarros
- \* Espasmos musculares
- \* Luxaciones
- \* Tendinitis
- \* Contusiones
- \* Retracciones musculares

Productos relacionados

P1313 - 1313 - 1325 - 2425 - BH

Producto distribuido por Pantymed S.A., empresa con Sistema de Calidad Certificado según norma ISO 9001. AUTORIZADO POR LA ANMAT PM 1662-10 CUIT: 30-59163398-4. Venta libre.

**Director Técnico:**  
Dr. Saúl Fernando Ambinder - Médico - Mat: 50537.

**Dirección:**  
Fragata Presidente Sarmiento 1569 - C1415CBI - CABA - Argentina - Tel.: +54-11-4581-8748

**Atención al Consumidor:**  
www.ptm.global - info@ptm.global



ficha\_de\_producto\_P1325\_v.1

PTM